

## DISINFEZIONE SUPERFICI E DISPOSITIVI MEDICI

**zero#310** è un disinfettante spray di livello intermedio ad azione tubercolicida, fungicida, battericida, attivo su virus con mantello. Specifico per la disinfezione e detersione di strumenti semicritici e non critici, quali manipoli di riuniti odontoiatrici (turbine, contrangoli, ablatori), apparecchiature a fibre ottiche, superfici operatorie, mobili sanitari, apparecchiature elettromedicali e chirurgiche in genere. **zero#310** è formulato in soluzione idroalcolica.

### Modalità di impiego:

**zero#310** si usa tal quale senza diluizione.

Nebulizzare con apposito erogatore a spruzzo direttamente sulle superfici o presidi da trattare. Lasciare agire come da tempi indicati in tabella.

Attività	Microrganismi	Concentrazione d'impiego	Condizioni	Tempi contatto
VIRUCIDA Su virus con mantello	virus con mantello (incl. HIV, HBV, HCV) Vaccinia Virus MVA Poliovirus type 1	Pronto all'uso	Pulito	5 min.
		Pronto all'uso	Sporco	10 min.
		Pronto all'uso	Pulito	5 min.
		Pronto all'uso	Sporco	10 min.
		Pronto all'uso	Pulito	5 min.
FUNGICIDA E LIEVICIDA	A. Niger dsm1988	Pronto all'uso	sporco	5 min.
	C. Albicans dsm1386	Pronto all'uso	sporco	5 min.
BATTERICIDA	S. Aureus dsm799	Pronto all'uso	sporco	5 min.
	E. Coli dsm682	Pronto all'uso	sporco	5 min.
	Salmonella ATCC 1331	Pronto all'uso	sporco	5 min.
MICOBATTERICIDA (tubercolicida)	M. Terrae dsm43227	Pronto all'uso	sporco	5 min.
	M. Avium DSM 44157			

Attività e spettro di azione

# zero#310



**Composizione:**  
Miscela alcolica (alcol etilico e isopropilico) 30g - O-Feinilfenolo - Dimetildidecilmmonio cloruro - Tensioattivi non ionici - Sequestranti - Acqua depurata a 100g.

**PRONTO USO**  
**SOLUZIONE IDROALCOLICA**

Confezione standard  
ref. #310 flacone da 750 ml  
ref. #310/5 tanica da 5 l