

VESTIGE CLEAR FLD/ VESTIGE CLEAR THX

SILICONE PER ADDIZIONE TRASPARENTE DA LABORATORIO PER LO STAMPAGGIO E INIEZIONE DI MATERIALI FOTOPOLIMERIZZABILI

DESCRIZIONE/ IMPIEGO

Vestige clear FLD / Vestige clear THX: Vinilpolisilossano trasparente da laboratorio a consistenza media. Indicato come controstampo nelle tecniche di stampaggio di compositi con muffola trasparente. Particolarmente adatto per lavori estesi.

Vestile clear FLD: versione fluida / **Vestile clear THX:** versione tissotropica

AVVERTENZE

Evitare il contatto con guanti in lattice.

PRECAUZIONI

Non ingerire, evitare il contatto con gli occhi.

MODO D'USO

Inserire Vestige clear nel dispenser manuale per cartucce 1:1 da 50 ml. La tacca a "V" sulla base della cartuccia deve essere rivolta verso il basso. Bloccare abbassando l'apposito dispositivo del dispenser. Togliere il tappo colorato ruotando ¼ di giro in senso antiorario. Agendo sulla leva del dispenser, erogare una piccola quantità di materiale fino a che i due componenti fuoriescono in modo uniforme. Eliminare il materiale estruso e montare il puntale miscelatore eseguendo l'operazione inversa alla rimozione del tappo.

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo asciutto ad una temperatura di 5-27°C (41-80°F). Proteggere da fonti di calore. I materiali sono garantiti fino alla data di scadenza se conservati correttamente nei loro imballi chiusi. Il lotto di produzione e la data di scadenza sono indicati sulle confezioni.

DATI TECNICI	VESTIGE CLEAR FLD / VESTIGE CLEAR THX
Rapporto di miscelazione	1:1
Tempo di miscelazione (23°C/73°F)	Automixing
Tempo totale di lavorazione (23°C/73°F)	1'
Tempo di indurimento (23°C/73°F)	12'
Durezza - Shore A	74 ± 2
Variazione dimensionale lineare	< 0,20%
Recupero elastico	>99,8%

Temperature più alte riducono i tempi indicati, temperature più basse li allungano.

Limitazione della responsabilità: Le indicazioni relative ai prodotti TRAYART, sia in forma orale che scritta, si basano sulla conoscenza ed esperienza acquisita nel campo odontotecnico. Gli utilizzatori professionisti sono comunque tenuti a seguire le indicazioni per l'uso e verificare l'idoneità del prodotto secondo il tipo di applicazione. L'utilizzatore professionista si assume tutte le responsabilità per i rischi derivanti da un uso non corretto dei prodotti TRAYART. Un'eventuale difettosità dei prodotti limita la responsabilità del fabbricante al valore dei prodotti utilizzati dal professionista.

SOLO PER USO DENTALE