

## DISINFEZIONE SUPERFICI E DISPOSITIVI MEDICI

**zero#300** è una soluzione disinfettante spray micobattericida, fungicida, battericida, attiva su virus con mantello. Specifico per la sanificazione, decontaminazione e disinfezione di dispositivi medici. Soluzione acquosa, pronta all'uso.

### Modalità di impiego:

**zero#300** si usa tal quale senza diluizione.

Disinfezione a secco: con apposito erogatore a spruzzo, nebulizzare il prodotto abbondantemente e diffusamente su superfici e dispositivi da disinfettare impiegando 40 ml/mq. Lasciare agire per almeno 5 minuti, se necessario asciugare. In caso di sporco estremo lasciare agire per 15 minuti. Non risciacquare per mantenere un effetto biocida residuo sulle superfici.

Attività	Microrganismi	Concentrazione d'impiego	Condizioni	Tempi contatto
VIRUCIDA Su virus con mantello	virus con mantello (incl. HIV, HBV, HCV)	Pronto all'uso	pulito	5 min.
		Pronto all'uso	sporco	15 min.
	Vaccinia Virus MVA	Pronto all'uso	pulito	5 min.
		Pronto all'uso	sporco	15 min.
FUNGICIDA E LIEVITICIDA	A. Niger dsm1988	Pronto all'uso	sporco	5 min.
	C. Albicans dsm1386	Pronto all'uso	sporco	5 min.
BATTERICIDA	p. Aeruginosa DSM939	Pronto all'uso	sporco	2 min.
	E. Coli dsm682	Pronto all'uso	sporco	2 min.
	Salmonella ATCC 1331	Pronto all'uso	sporco	2 min.
MICOBATTERICIDA (tuberculicida)	M. Terrae dsm43227	Pronto all'uso	sporco	5 min.
	M. Avium DSM 44157			

Attività e spettro di azione

# zero#300



### Composizione:

Poliesametilenebiguanide 0,2g -  
Dimetildidecilmmoniocloruro  
0,5g - Tensioattivi cationici -  
Tensioattivi non ionici -  
Sequestranti - Acqua a 100g.

PRONTO USO

FRAGRANZA: MELA VERDE

Confezione standard  
ref. #300 flacone da 750 ml  
ref. #300/5 tanica da 5 l